

ラボトルクドライバー

歯科インプラント技工用器材

模型上のトルク管理に最適なデジタルドライバー トルク計測により再製率低減に貢献

- **ドライバー感覚の簡単操作**
デジタルでトルク確認
- **リアルタイムのトルク表示**
音と光で締めすぎ防止
- **CAD/CAMスキャンボディ対応**
ひずみ少なく固定

ラボトルクドライバー セット

製品番号

LTD001

セット内容

- ・ラボトルクドライバー
- ・ドライバーホルダー
- ・ケース

※各種ドライバーは別売りとなります。



ラボスクリューのトルク管理を標準化
ラボサイドでのリスク低減に効果◎

Dental Technician Only
6~60cN·m

ラボトルクドライバーの使用例



均等トルク固定が必要な
ロングスパンでの症例に



フィットが重要なスクリュー固定の
トルク管理の標準化に




CAD/CAMスキャンボディの
精密な適正固定に

適用インプラントシステム (設定ドライバー 6種)

- Hex1.0AK (アンキロスタイル) ● Hex1.2AT (ジンマー&アストラテックタイプ) ● Unigrip (ノーベルバイオケアタイプ)
- Hex1.2BM (3iタイプ) ● Hex1.2SM (スウェーデン&マルティナタイプ) ● SCS (ストローマンタイプ)


ラボトルクドライバーの使用方法

● 準備

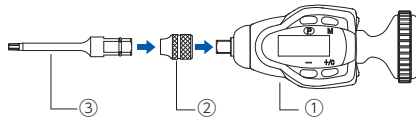


ラボトルクドライバー(①)に
ドライバーホルダー(②)と
選定したドライバー(③)を装着する。


● 計測する

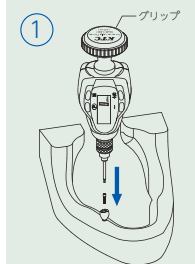

① 対象物にセットし、
作業します。

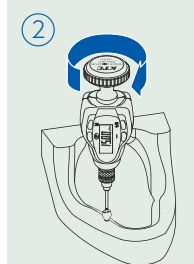


② トルク値を計測する
場合は、グリップ
をにぎり作業方向
にゆっくりと力を
加えます。

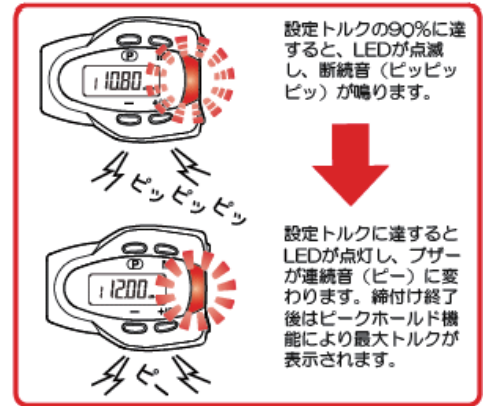

セット内容


● ラボトルクドライバー

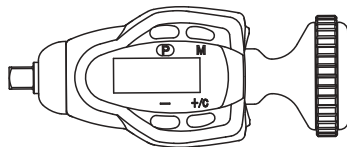


員数:1

製品名	ラボトルクドライバー
品番	LTD0002
測定範囲(左右)	6 ~ 60cN・m
外径寸法	約100(全長)×41(幅)×33(高さ)mm
重量	約160g(ドライバーホルダー、ドライバー含)
電池	コイン型リチウム電池 CR2354(1個使用)
電池寿命	約1 ヶ月(100回/日使用時)

● 入組

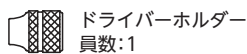

ドライバーホルダー
員数:1

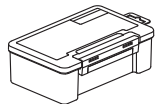


樹脂ケース
1個


製品名	ラボトルクドライバードライバーホルダー
品番	LTD0003

オプション品

● ドライバー ラインナップ [別売り]

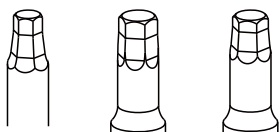

Hex1.0AK Hex1.2AT Hex1.2BM

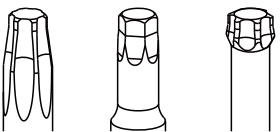

UniGrip Hex1.2SM SCS

製品名	対応メーカー/システム	製品番号	製品
ドライバー(Hex 1.0AK)	DENTSPLY / Ankylos	LTD0011	
ドライバー(Hex 1.2AT)	DENTSPLY / Astra Tech Zimmer Biomet (3i以外)	LTD0012	
ドライバー(Hex 1.2BM)	Zimmer Biomet / 3i	LTD0013	
ドライバー(UniGrip)	Nobel Biocare	LTD0014	
ドライバー(Hex 1.2SM)	sweden&martina	LTD0015	
ドライバー(SCS)	straumann	LTD0016	
極短レンチアダプタ※	ハンドピース用*	LTD0017	

※最適なフィットのため、専用のドライバーを設定しております。オプションの極短レンチアダプタにより、各システムに適用(コントラ対応ハンドピースアタッチメント装着可能)することができます。

⚠ ラボトルクドライバー、ドライバーホルダー、ドライバーは歯科インプラント技工専用です。口腔内では使用しないでください。

[販売元]



DTI / STARGATE CENTRAL OFFICE

〒320-0026 栃木県宇都宮市馬場通り2-1-1

NOF宇都宮ビル7F

● 高度管理医療機器等販売業許可番号 第M1525号

発注/お問合せ

TEL 0120-418-325 FAX 028-612-2106

<http://www.dti-cadcam.com>

[製造販売元] **KTC 京都機械工具株式会社**
<http://medical.ktc.jp/>

歯科インプラント技工用器材 一般医療機器

(東証2部上場)

販売名: ラボトルクドライバ 医療機器届出番号: 26B3X10009150101 極短レンチアダプタ 届出番号: 26B3X10009130011

© 2017 HAKUHO CO., Ltd. All right reserved. DTI0033