

オールジルコニア グラデーション



ーオールジルコニア グラデーションー

従来のジルコニアに、天然歯がもつ蛍光性を有し、自然なグラデーションが特徴のジルコニアです。

オールジルコニア グラデーション(ラヴァ™ エステティック)

●適応症例

- 単独歯修復補綴(全部被覆冠)または複数歯修復補綴(全部被覆連結冠)に使用
- オンレー／ベニア

●納期

- 模型送り：3歯まで 模型到着日を含む4営業日後に発送
 - データ送信：データ受信日を含む3営業日後に発送
- ※詳しい納期につきましては、HPよりご確認ください

●材料

- ラヴァ™ エステティック ジルコニア (スリーエムジャパン)

●シェード

- 8色

●保証対象の症例

- ・中間歯欠損3本ブリッジまで
- ・インプラントを支台歯とした場合保証対象外となります。

※詳しい保証対象の症例につきましては、DTI東京までご連絡ください。

特徴

天然歯に近似した蛍光性



明るく、エナメル質に近い質感

Incisal Transition Bodyの3つのゾーン
IncisalからTransitionは徐々に色の濃さが増していきます。

全8色のビタシェードガイドを再現


Bleach A1 A2 A3 A3.5 B1 C1 D2

強度は800MPa

適応症・・・ベニア・クラウン・中間歯欠損3本ブリッジ

注意事項 / 削除量

Lava™ エステティック デザイン

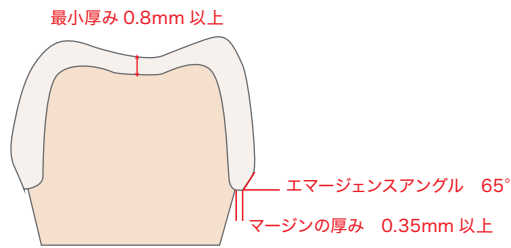


焼成について

- ※ 800℃以下の温度で築盛、グレージング、ステイニングを行なってください。
- ※ 焼成は真空下では行わないでください。

発注について

●発注方法は下記のいずれかをお願いします。

- ① **模型送りによる発注** 下記の3点をDTI東京へお送りください。
 - ・ DTI 技工指示書 (4枚複写のうち3枚目と4枚目の2枚を同封してください)
 - ・ ワックスアップ
 - ・ 可撤式模型 (ダウエルピン模型)
- ② **データ送信による発注** 詳しくはDTI東京までお問い合わせください。

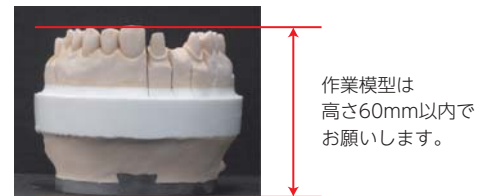

ご注意点

- ※ 支台歯は必ずトリミングし、マージンラインは明瞭にしてください。
- ※ 最終形態で発注の場合は、ワックスアップが必須となります。
- ※ お預かりした模型への適合については保証対象内ですが、口腔内の適合については保証対象外となります。
- ※ ご送付物の不足や、技工指示書の記入漏れなどがある場合は、お客様にご確認が取れるまで作業を中断させていただきます。
- ※ 未研磨/未調整の状態で納品になります。

Lava™ エステティック ジルコニア送付先/お問合せ

DTI / Tokyo Office (DTI東京)

〒130-0014 東京都墨田区亀沢4-9-4-101
TEL.03-5610-3680 FAX.03-5610-3681
E-mail: dti@hakuho-d.com
Website URL: www.dti-cadcam.com/
※DTI 技工指示書は、DTIホームページからダウンロードできます。

