

# ラボトルクドライバー

歯科インプラント技工用器材

## 模型上のトルク管理に最適なデジタルドライバー トルク計測により再製率低減に貢献

### ■ ドライバー感覚の簡単操作

デジタルでトルク確認

### ■ リアルタイムのトルク表示

音と光で締めすぎ防止

### ■ CAD/CAMスキャンボディ対応

ひずみ少なく固定

#### ラボトルクドライバー セット

製品番号

LTD001

#### セット内容

- ・ラボトルクドライバー
- ・ドライバーホルダー
- ・ケース

※各種ドライバーは別売りとなります。



ラボスクリューのトルク管理を標準化  
ラボサイドでのリスク低減に効果◎

Dental Technician Only  
6~60cN·m

## ラボトルクドライバーの使用例



均等トルク固定が必要な  
ロングスパンでの症例に



フィットが重要なスクリュー固定の  
トルク管理の標準化に




CAD/CAMスキャンボディの  
精密な適正固定に

## 適用インプラントシステム (設定ドライバー 6種)

- Hex1.0AK(アンキロスタイプ) ● Hex1.2AT(ジンマー&アストラテックタイプ) ● Unigrip(ノーベルバイオケアタイプ)
- Hex1.2BM(3iタイプ) ● Hex1.2SM(スウェーデン&マルティナタイプ) ● SCS(ストローマンタイプ)


# ラボトルクドライバーの使用方法

## ● 準備

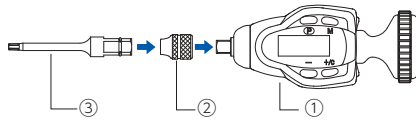


ラボトルクドライバー(①)に  
ドライバーホルダー(②)と  
選定したドライバー(③)を装着する。


## ● 計測する

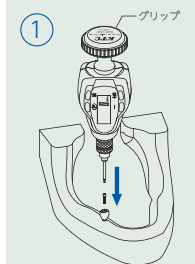

① 対象物にセットし、  
作業します。

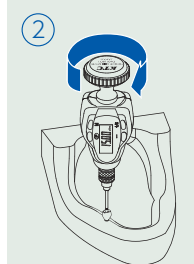

② トルク値を計測する  
場合は、グリップ  
をにぎり作業方向  
にゆっくりと力を  
加えます。

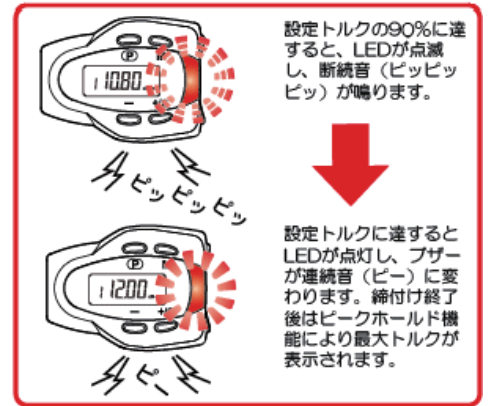


設定トルクの90%に達  
すると、LEDが点滅  
し、断続音(ビッピ  
ッ)が鳴ります。

設定トルクに達すると  
LEDが点灯し、プザー  
が連続音(ビー)に  
変わります。締付け終了  
後はピークホールド機  
能により最大トルクが  
表示されます。

## セット内容


### ● ラボトルクドライバー

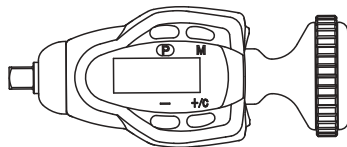


員数:1

製品名	ラボトルクドライバー
品番	LTD0002
測定範囲(左右)	6 ~ 60cN・m
外径寸法	約100(全長)×41(幅)×33(高さ)mm
重量	約160g(ドライバーホルダー、ドライバー含)
電池	コイン型リチウム電池 CR2354(1個使用)
電池寿命	約1 ヶ月(100回/日使用時)

### ● 入組

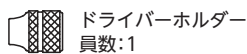

ドライバーホルダー  
員数:1

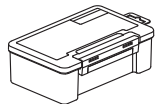


樹脂ケース  
1個


製品名	ラボトルクドライバードライバーホルダー
品番	LTD0003

## オプション品

### ● ドライバー ラインナップ [別売り]

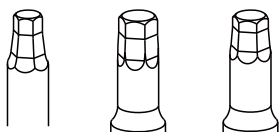

Hex1.0AK Hex1.2AT Hex1.2BM

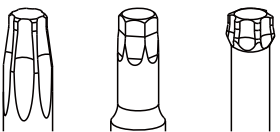

UniGrip Hex1.2SM SCS

製品名	対応メーカー/システム	製品番号	製品
ドライバー(Hex 1.0AK)	DENTSPLY / Ankylos	LTD0011	
ドライバー(Hex 1.2AT)	DENTSPLY / Astra Tech Zimmer Biomet (3i以外)	LTD0012	
ドライバー(Hex 1.2BM)	Zimmer Biomet / 3i	LTD0013	
ドライバー(UniGrip)	Nobel Biocare	LTD0014	
ドライバー(Hex 1.2SM)	sweden&martina	LTD0015	
ドライバー(SCS)	straumann	LTD0016	
極短レンチアダプタ※	ハンドピース用*	LTD0017	

※最適なフィットのため、専用のドライバーを設定しております。オプションの極短レンチアダプタにより、各システムに適用(コントラ対応ハンドピースアタッチメント装着可能)することができます。

⚠ ラボトルクドライバー、ドライバーホルダー、ドライバーは歯科インプラント技工専用です。口腔内では使用しないでください。

[販売元]



DTI / STARGATE CENTRAL OFFICE

〒320-0026 栃木県宇都宮市馬場通り2-1-1

NOF宇都宮ビル7F

● 高度管理医療機器等販売業許可番号 第M1525号

発注/お問合せ

TEL 0120-418-325 FAX 028-612-2106

<http://www.dti-cadcam.com>

[製造販売元] **KTC 京都機械工具株式会社**  
<http://medical.ktc.jp/>

歯科インプラント技工用器材 一般医療機器

(東証2部上場)

販売名: ラボトルクドライバ 医療機器届出番号: 26B3X10009150101 極短レンチアダプタ 届出番号: 26B3X10009130011

© 2017 HAKUHO CO., Ltd. All right reserved. DTI0033